


## इस्तेमाल करने के निर्देश


क्यूपीडस् नैचरल लेटेक्स महिला कोन्डोम

**चरण 1 :** महिला कोन्डोम के पैकेट को सावधानीपूर्वक खोलें, पैकेट के एकदम ऊपर बने कटाव से फाड़ें। खोलने के लिए कैंची या चाकू का उपयोग न करें।




**चरण 2 :** महिला कोन्डोम का बाहरी घेर योनि द्वार के चारों तरफ के भाग को ढक कर रखता है। भीतरी स्पंज संभोग के समय प्रवेशन के काम आता है और खोल को अपने स्थान पर रुके रहने में सहायता करता है।


बाहरी घेर ▶  
भीतरी स्पंज ▶




**चरण 3 :** खोल को बंद छोर से पकड़ते हुए, स्पंज को पकड़े और इसे अंगुठे और दूसरी या बीच वाली अंगुली की सहायता से दबाएँ ताकि वह लम्बा व संकरा हो जाए।

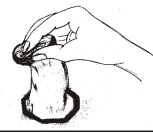

**चरण 4 :** प्रवेशन के लिए जो स्थिती आरामदेय हो वह चुने; पालथी मार कर, एक टाँग उठा कर, बैठ कर या लेट कर। महिला कोन्डोम के भीतरी घेरे को धीरे से योनि के अन्दर डालें। भीतरी स्पंज को ऊपर जाते हुए और अपनी स्थान की ओर चलते हुए महसूस करें।




**चरण 5 :** अपनी तर्जनी अंगुली को कोन्डोम के अंदर टिकाएँ, और भीतरी स्पंज को ऊपर की ओर धकेले जितना वह जाए। ध्यान रहे कि खोल घूमे नहीं। बाहरी घेर योनि के बाहर रहना चाहिए।




Cupid Ltd.  
Nashik - India


**चरण 6 :** महिला कोन्डोम अब अपने स्थान पर है और अपने साथी के साथ इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।




**चरण 7 :** ध्यान रहे कि शिशन साईड से अन्दर न जाए, खोल और योनि भीत के बीच से ही जाए।

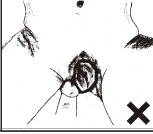

**चरण 8 :** जब आप तैयार हों तो, अपने साथी के शिशन को अपने हाथ से धीरे से खोल के द्वार तक ले जाएँ ताकि वह सही तरीके से प्रवेश हो।

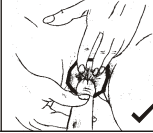

**चरण 9 :** महिला कोन्डोम को हटाने के लिए, बाहरी घेर को घुमाएँ और धीरे से कोन्डोम को बाहर की ओर खींचें।



**चरण 10 :** कोन्डोम को पैकेट में या टिशू पेपर में लपेटें, और कूडेदान में फेंक दें। इसे शौचालय में न डालें।

